




Εγκατάσταση εργοστασίων

Ο αυτόματος διακόπτης ενεργοποίησης που σχετίζεται με τη γωνία ενεργοποιείται αυξανοντας την κεφαλή/το φως μέχρι το ύψος στο οποίο απενεργοποιείται το φως
Φωτεινή ένταση: 10.000 lux


1) Αρχική λειτουργία

Τοποθετήστε την μπαταρία χωρίς να αγγίξετε το κουμπί (ο αισθητήρας βαθμονομείται) Η λυχνία ανάβει και σβήνει ξανά μετά από λίγα δευτερόλεπτα και είναι έτοιμη τώρα για χρήση.

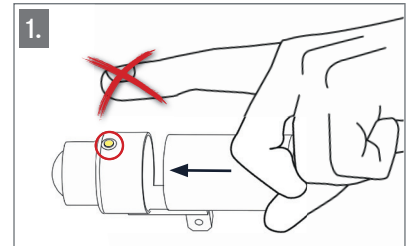

2) Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Αγγίξτε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το φως - η λυχνία σβήνει αγγίζοντας ξανά. Σε περίπτωση δυσκολιών με την αίσθηση του κουμπιού, μετακινήστε το δάχτυλό σας από την μπαταρία προς τα εμπρός πάνω από το κουμπί.

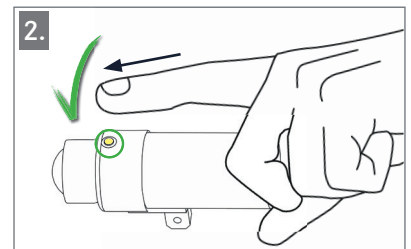

3) Ρύθμιση της φωτεινότητας:


Η λειτουργία ρύθμισης μπορεί να ενεργοποιηθεί ενεργοποιώντας το φως και σβήνοντας ξανά 3 φορές στη σειρά. Κάθε περαιτέρω επαφή ρυθμίζει τη φωτεινότητα από το χαμηλότερο στο υψηλότερο επίπεδο και από το υψηλότερο επίπεδο πίσω στο χαμηλότερο. Η τελευταία ένταση αποθηκεύεται μετά από 3 δευτερόλεπτα.

4) Ρύθμιση της γωνίας που σχετίζονται on-off αυτόματο διακόπτη:

4 επιλογές: 3 διαφορετικές γωνίες ή μόνιμο φως

α) Ενεργοποιήστε το φως και

β) διπλό ελαφρη χτύπημα με δύο δάχτυλα κατά το αριστερό ή δεξί χέρουλη μέσα στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα. Το διπλό χτύπημα αναγνωρίζεται από ένα σύντομο φλας ανάλογα με το αν ήταν επιτυχής (δείτε την εικόνα στα δεξιά).

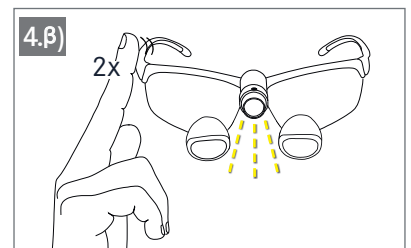


γ) Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το φως 3 φορές στη σειρά για να ρυθμίσετε τη

γωνία. 1x λάμψη: **μικρή** γωνία 2x λάμψη: **μέση** γωνία

3x φλας: **μεγάλη** γωνία (δείτε την εικόνα στα δεξιά)

Η γωνία φλας 4x (φως τρεμοπαίζει) απενεργοποιείται → μόνιμο φως.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται μετά από 6 δευτερόλεπτα.

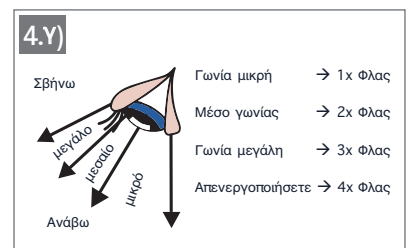

5) Περισσότερες πληροφορίες:

Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας: η λυχνία απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν αναγνωρίζεται περαιτέρω κίνηση για περισσότερο από 3 λεπτά μετά την αφαίρεση τον λούπον.

η επαναφορά του φωτός μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αφαίρεση της μπαταρίας (βλ. 1), ωστόσο η φωτεινότητα και ο αυτόματος διακόπτης on-off παραμένουν αποθηκευμένοι (αμετάβλητοι).

Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη μετά από περίπου 1 ώρα.

Ενημέρωση από: 11.08.2020

Σημείωση: Το Quickstart δεν αντικαθιστά την ανάγνωση του εγχειριδίου οδηγιών του spot-on®cordfree.